

50mLカートリッジタイプ印象材／咬合採得材料用
ハンディータイプ電動式ミキシングガン

ナイスミキシングガン



- 女性にも使いやすい
本体重量わずか800gの
電動式ミキシングガン
- スタートボタンを押すだけで
安定した材料の押出が可能
- 押出速度を無段階で調節できる
スピードコントローラー付
- スイッチボタンを離すと
プランジャーが5~10mm
後退して停止する
オーバーフロー防止機能付
- 最大推力150kgのため、
中／高粘性の材料も
ラクラク押出可能
- 1年保証

歯科医院様参考価格 **¥25,000**

ナイスミキシングガン& カートリッジタイプ印象材&ミキシングチップ装着例



製品紹介動画は
こちらから



仕様

製品名	ナイスミキシングガン
本体重量	800g
定格電圧 (DC)	7.4V
無負荷速度	10mm/秒
寸法 (縦×横×高さ)	223×70×210mm
動作温度	-15℃~50℃
最大推力	140±10kg

カートリッジタイプ (50mL 1:1/2:1) 用
※電源アダプターは付属されておりません。
推奨電源アダプター：5V 2A

※本品と併用するカートリッジタイプ歯科材料およびミキシングチップの添付文書に従って使用してください。
特に、カートリッジタイプ歯科材料の指定するミキシングチップ種類以外のチップを装着した場合、
本品の推力により、ミキシングチップが破損して、歯科材料が溢出する可能性がございますので、ご注意ください。



NICEJOON

関連製品

カートリッジタイプ印象材／咬合採得材料用



セイルグローバル ミキシングチップ

L グリーン

S131

全長
87mm

80本入

歯科医院様参考価格
¥2,100

S ピンク

S132

全長
80mm

80本入

歯科医院様参考価格
¥2,100

SS イエロー

S130

全長
70mm

80本入

歯科医院様参考価格
¥2,100

SSS ブルー

S133

全長
57mm

80本入

歯科医院様参考価格
¥2,100

オーラルチップSS・イエロー

S115

100個入

ミキシングチップ SS イエロー (S130)用。

歯科医院様参考価格
¥880

オーラルチップS・ホワイト

S116

100個入

ミキシングチップ S ピンク (S132)用。

歯科医院様参考価格
¥880

バイトチップ

S122

50個入

ミキシングチップ L グリーン (S131)用。

歯科医院様参考価格
¥1,200

一般医療機器 歯科用練成器具、歯科用注入器具、医療機器届出番号13B1X10394240001


製造業者：SEILGLOBAL CO.,LTD. (セイルグローバル社)

チップは単回使用です。製造国：大韓民国

ナイスミキシングガン&ミキシングチップ ご使用方法



充電口に、USB Type-Cケーブルを差し込み、充電します。
(初回の充電時間：3.5時間)

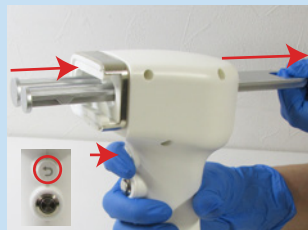

ロック解除ボタンを押したまま、プランジャーを最後方まで引きます。



カートリッジを装着します。




スタートボタンを押し続けて、材料が等量出るか少量の試し出しを行い、スタートボタンから指を離し、材料の押出を停止し、材料をすり切ります。



カートリッジの注出口を拭き、ミキシングチップをカートリッジに装着します。



スタートボタンを押し続けて、材料を必要量押し出します。
※スピードコントローラーを回して、押出速度を調整してください。

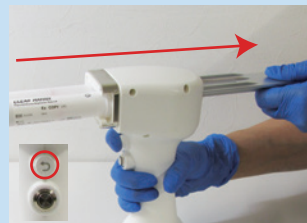

カートリッジを取り外す際には、ロック解除ボタンをしっかりと押した状態で、プランジャーを最後方まで引きます。



カートリッジを取り外します。

本紙に掲載されている価格は2024年10月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は