




チークリトラクターLF

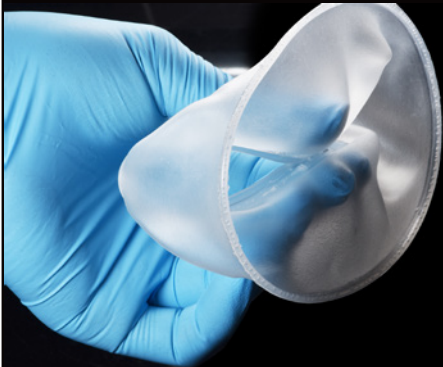

20個入 歯科医院様参考価格 ¥5,600



ホワイトテフロンテープ



5m 1個入 歯科医院様参考価格 ¥950

スタビライザーコード



2.1m 1個入 歯科医院様参考価格 ¥950

ラテックスフリー開口器

チークリトラクターLF



一般医療機器 歯科用開口器 医療機器届出番号 13B1X10394260001

特長

- 柔軟性の高いラテックスフリーの開口器です。
- リングにより、口唇に均等な力がかかり、十分に口唇と頬を排除し、術野の確保を容易に行うことができます。
- 上唇小帯・下唇小帯への過度の圧力を防ぐ内リングに凹部付き。

サイズ (L×W×H) : 約95×84×44mm
1箱 20個入

口腔内スキャン時の口唇の保護に



矯正治療時の開口に






印象採得時の口唇の保護に



臨床写真ご提供：東北大学歯学部研究科 分子・再生歯科補綴学分野 河阪 幸宏 先生

- 1 外リング側から、指で内リングの上部と下部を保持し、口腔内に装着しやすい形状に軽く曲げます。
- 2 内リングを口角の裏側に合わせて、頬側粘膜部へ挿入します。
- 3 反対側を同様に口腔内に挿入します。
- 4 内リングの位置を調整し、外リングは口腔外にくるようにします。

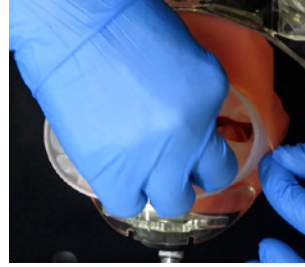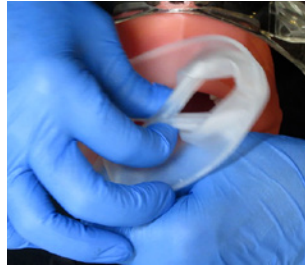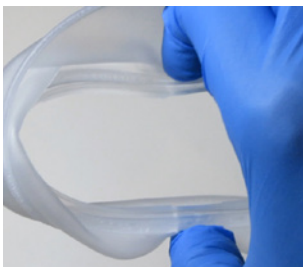

歯科用隣在歯隔離用テープ

ホワイトテフロンテープ



一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具、歯肉圧排材料
医療機器届出番号 13B1X10394260002

特長

- 伸長性と被覆力に優れたテフロンテープです。
- 薬品に耐性があるテープのため、隣在歯の保護および隔離に優れています。
- カッター付ケースのため、ハサミ等を使用せず直接テープをカットすることができます。

サイズ：幅13mm、厚さ0.1mm、長さ5m

カラー：ホワイト

材質：テフロン（ポリテトラフルオロエチレン）

隣在歯の保護に



テープを隣在歯に固定します。



反対側も簡単に外れずに操作の邪魔にならないように固定します。



テープは薬剤から隣在歯を保護します。



テープをフロスのように用いて、セメントアウトを行いやすくすることもできます。

臨床写真ご提供：鶴田歯科医院 鶴田 剛士 先生

歯肉溝の封鎖に



テープを歯肉溝の中に入れます。



テープで隣在歯を保護し、セメンテーションします。



セメンテーション後、隣在歯および歯肉溝内のテープを取り除きます。

臨床写真ご提供：鶴田歯科医院 鶴田 剛士 先生

インプラントのアクセスホールの封鎖に



※補綴物の作成時に、本品をインプラントのアクセスホールなどの封鎖に使用する場合は、作成後、補綴物から本品を取り除いてください。

※口腔内にて最終補綴物とインプラントとの連結時に、インプラントのアクセスホールを封鎖する材料として、本品を使用することはできません。

カッター付ケース！


テープを簡単にカットできる刃が付いています！



1 ケースの刃で、テープを必要な長さにカットします。



2 テープを歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付けます。

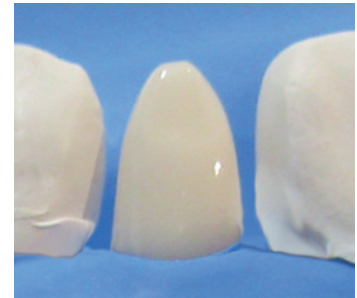

ラバーダム固定用コード

スタビライザーコード




特長

- ラバーダム固定用コードです。
- ノンラテックスでありながら、優れた伸長性と弾力性があり、ラバーダムをしっかりと固定させることができます。


サイズ：直径：1.8mm 長さ：2.1m
カラー：オレンジ
材質：熱可塑性エラストマー樹脂（TPE）

一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器届出番号 13B1X10394260003

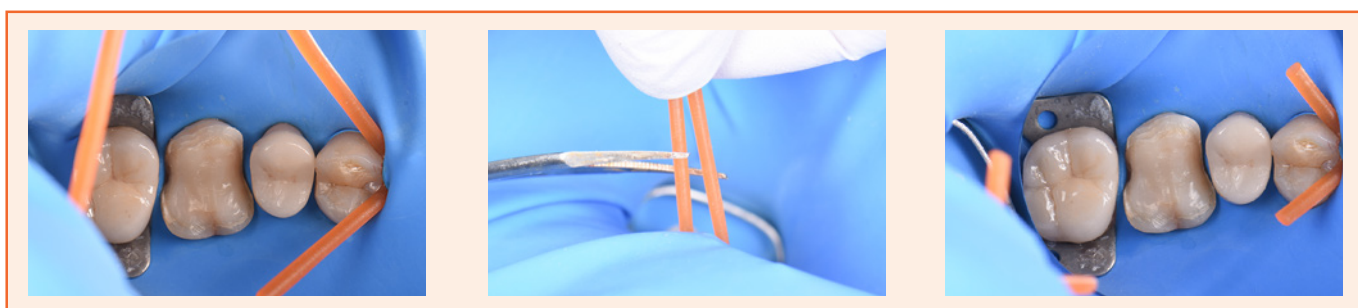

① コードを必要な長さにカットします。

② コードの両端を引っ張り、細く伸ばして、歯間部に挿入し、ラバーダムを固定させます。

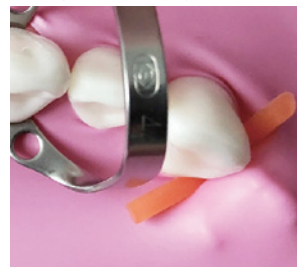

臨床写真ご提供：スウェーデンデンタルセンター仙台 柿内 裕輔 先生
東北大学歯学部研究科 分子・再生歯科補綴学分野 河阪 幸宏 先生

本紙に掲載されている価格は2024年9月のもの(税抜)です。
形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造業者：Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (略称：ZTデンタル社)
製造国：中華人民共和国



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は