

2025年1月21日(火)~2025年3月19日(水)

歯髄をPROTECT!!

セラファミリー

TheraFamily

キャンペーン



セラベースの
臨床使用例は
コチラから



写真ご提供; 日本大学 高見澤 俊樹先生


セラカルLC
および
セラベースの
臨床動画は
コチラから



動画ご提供; すずしろ歯科 山本 麻美先生

MTAを活かす！

BISCO 社独自の親水性モノマー・レジンマトリックス技術

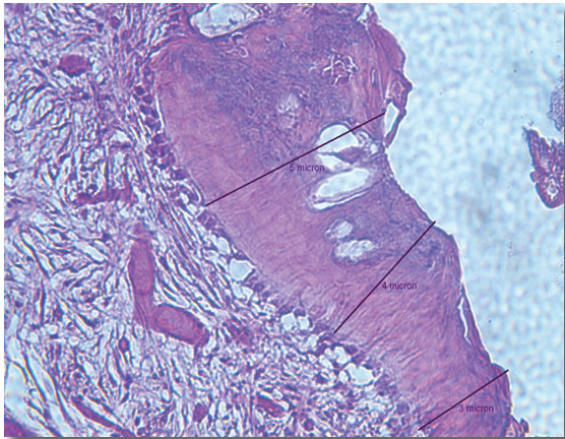

セラカルLCを適用した28日後。
デンティンブリッジの形成を確認することができます。


生体親和性&高い封鎖性

”Thera”ファミリー製品には、歯科用覆髄材料として注目されているMTA成分の「ポルトランドセメント」を配合しています。

湿潤象牙質あるいは露髄面に直接適用させることにより、カルシウムイオンや水酸化物イオンなどを放出し、デンティンブリッジの形成を促進させ、歯髄を保護します。

”Thera”テクノロジー

BISCO 社の”Thera”テクノロジーは、親水性レジンマトリックス、疎水性モノマー、ポルトランドセメントを独自に配合させることにより、レジンの簡便な操作性を実現しつつもMTAの作用を発揮させることを実現しました。親水性レジンマトリックスは、象牙細管内液と浸透性をもちながらも、不溶解で、水分を取り込むのと同時にレジンマトリックス外にカルシウムイオンと水酸化物イオンを放出させ、水酸化物イオンは、強アルカリ性環境をつくり、カルシウムイオンは、歯髄にはデンティンブリッジ形成能を促進し、歯質には再石灰化を促進させることができます。

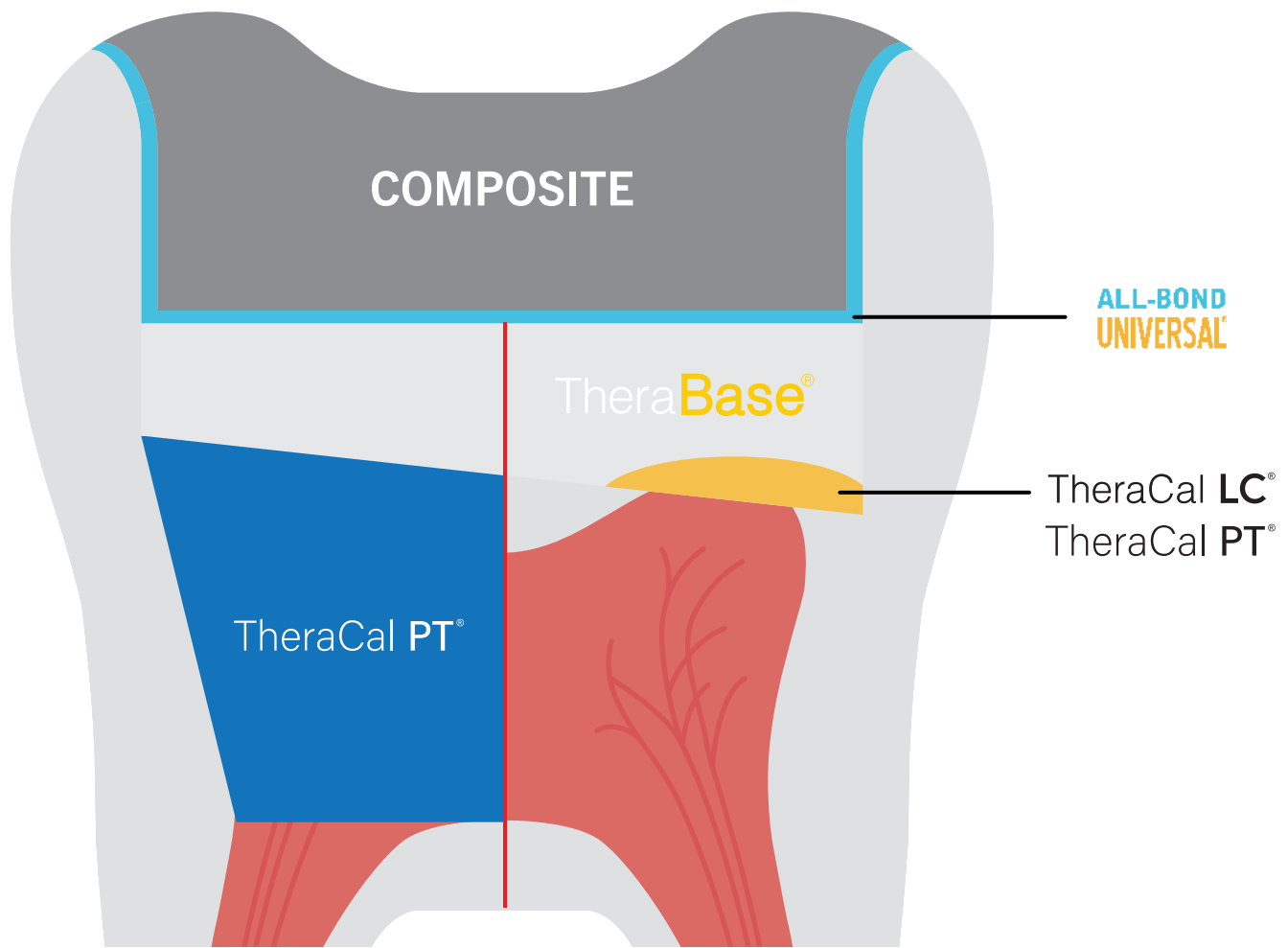

セラカル LC

光重合型 MTA 系覆髄材料です。

手混和不要の 1 ペーストタイプのため、シリンジタイプから直接歯髄に適用し、光照射 20 秒間で硬化しますので、操作性に優れています。



直接覆髄

間接覆髄


セラカル LC 適用前



セラカル LC 適用中



光照射

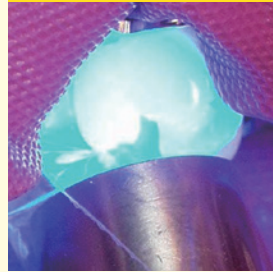

光重合型

- 光重合: 20秒間 (500mW/cm²)
- 厚み1mm以下にて積層充填
- スポット覆髄が可能

セラカル PT

生活歯髄切断法にも使用できる自動練和タイプのデュアルキュア型覆髄材料および裏層材です。



生活歯髄切断法

直接覆髄

間接覆髄

セラカル PT 適用前



セラカル PT 適用中



セラカル PT 適用後



デュアルキュア型


- 光重合: 10秒間 (500mW/cm²)
- 化学重合: 5分(35°C)
- 深い窩洞などにバルク充填が可能

セラベース

高い曲げ強度、高い圧縮強さを実現した自動練和タイプのデュアルキュア型裏層材 (ベース&ライナー) です。

デュアルキュア型


- 光重合: 20秒間 (500mW/cm²)
- 化学重合: 5分以下(37°C)
- ナチュラルシェード

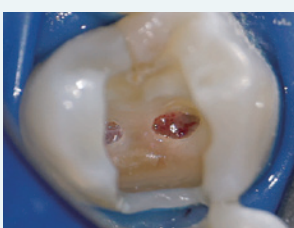


窩洞形成後。



露髄部にMTAセメント (粉・液タイプ) を適用します。

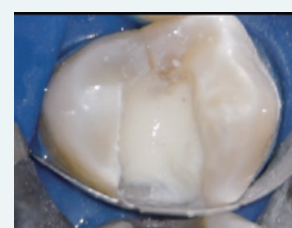

セラベースで裏層をし、光重合 20秒間 (500mW/cm²) します。

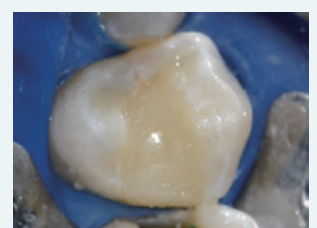

光重合型コンポジットレジンを用いて仮封します。

数量限定

少量お試しキャンペーン

セラカルPT 2g 1本入 + セラベース 1g 1本入 キャンペーン



内容：
・セラカルPT 2g 1本
・デュアルシリンジミキシングチップ（ディスベンシングチップ）8個

歯科医院様参考価格
¥9,000



内容：
・セラベース 1g 1本
・デュアルシリンジミキシングチップ（ディスベンシングチップ）5個

歯科医院様参考価格
¥3,800

相当

合計歯科医院様参考価格
¥12,800

特別価格

にてご提供いたします

既存ユーザー様おすすめキャンペーン

光重合型 MTA系 覆髄材料

混和不要でシリンジから直接適用できる光重合型覆髄材料です。生体親和性に優れています。

セラカルLC 1g 1本入 キャンペーン



内容：
・セラカルLC 1g 1本
・シリンジチップ（ブラック）22G）15個

歯科医院様参考価格
¥6,900

特別価格

にてご提供いたします

セラカルLC 1g 4本入 キャンペーン



内容：
・セラカルLC 1g 4本
・シリンジチップ（ブラック）22G）50個

歯科医院様参考価格
¥24,000

特別価格

にてご提供いたします

管理医療機器 医療機器認証番号 225AGBZX00008000

デュアルキュア型 MTA系 覆髄材料

セラカルPT 4g 1本入 キャンペーン



内容：
・セラカルPT 4g 1本
・デュアルシリンジミキシングチップ（ディスベンシングチップ）15個

歯科医院様参考価格
¥16,000

特別価格

にてご提供いたします

管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00006000

デュアルキュア型 MTA系 自己接着型裏層材

セラベース 8g 1本入 キャンペーン



内容：
・セラベース 8g 1本
・デュアルシリンジミキシングチップ（ディスベンシングチップ）30個

歯科医院様参考価格
¥19,000

特別価格

にてご提供いたします

管理医療機器 医療機器認証番号 303AKBZX00082000

本誌に掲載されている価格は2024年12月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は