

機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)  
\* (歯肉圧排材料 (70882000))  
**ホワイトテフロンテープ**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2.再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**



サイズ:幅 13mm、厚さ 0.1mm、長さ 5m  
カラー:ホワイト  
材質:テフロン(ポリテトラフルオロエチレン)

**【使用目的又は効果】**

本品は、口腔内で充填材又は修復材等を適用する際に用いる。  
\*また、歯肉を圧排するために一時的に用いる。

**【使用方法等】**

- 1.隣在歯隔離  
(1)ケースの刃で、本品を必要な長さにカットする。  
(2)本品を歯間部に挿入し、舌側と唇側からテープの両端を引っ張り、しわを伸ばしながら隣在歯に貼り付ける。

**\*2.歯肉圧排**

- (1)ケースの刃で、本品を必要な長さにカットする。
- (2)テープを糸状にし、歯肉圧排器具等を用いて、歯肉溝に挿入する。
- (3)圧排が得られた後、テープを歯肉溝から除去する。

[使用方法における使用上の注意]  
使用後は本品を口腔内から取り外すこと。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- 1.単回使用。再使用は交差感染を引き起こす可能性がある。
- 2.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 3.補綴物作成時、本品をインプラントのアクセスホール等の封鎖に使用する場合は、作成後、補綴物から本品を取り除いてください。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社モリムラ  
電話番号 03-5808-9350  
製造国 中華人民共和国  
製造業者 Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd.  
(タンシャン ツェントン エキシビション カンパニー リミテッド)